

HEINE XR Одноразовая ларингоскопическая рукоятка с нижней крышкой



93/42/EWG/CEE/EEC

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0
Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
med 1012 1/8.12

Ларингоскопическая одноразовая рукоятка с нижним модулем HEINE XR.

Инструкции по применению

Перед использованием ларингоскопической рукоятки HEINE XR, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и держите её под руками для обращения к ней по мере необходимости.

Меры безопасности

Область применения: данная ларингоскопическая рукоятка HEINE XR предназначена только для одноразового использования и применяется для проведения эндотрахеальной интубации при помощи фиброоптических ларингоскопических клинков или клинков XR; рукоятка будет функционировать только при наличии в ней батарейки HEINE.


Общие меры безопасности: Используйте только пластиковые или металлические клинки с зеленой идентификационной отметкой. Не используйте ларингоскоп при наличии сильного магнитного поля.

Перед использованием убедитесь, что в рукоятку XR установлена батарейка HEINE и загорелся свет.

Образование перекрестной инфекции можно избежать только при использовании незараженных батареек.

Безопасность при использовании: функционирование данного прибора может быть гарантировано только при использовании батарейки HEINE, лампочки HEINE и фирменных запасных деталей HEINE.

Настройка:

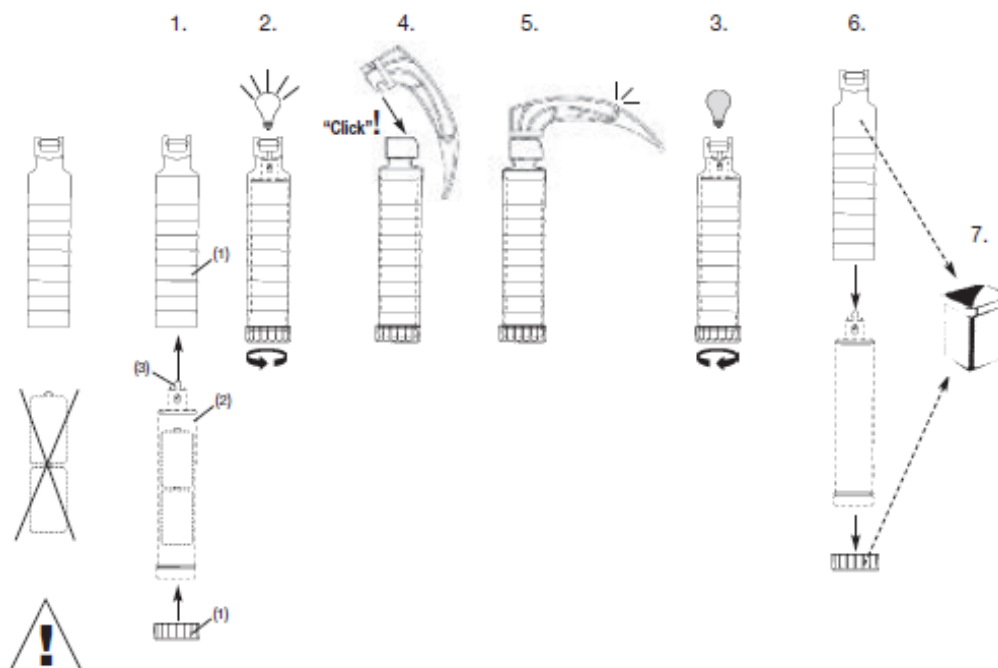

Техническая информация

Транспортировка: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Хранение: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Условия использования: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Аксессуары и запасные части

Батарейка 2,5 V

F-001.22.859

Батарейка 3,5 V

F-002.22.859

Ксенон-галогенная запасная лампочка XHL 2,5V

X-001.88.035

Ксенон-галогенная запасная лампочка XHL 3,5 V

X-002.88.044

Rechargeable battery NiMH 3,5 V

Аккумулятор Li-ion 3,5 V

Применимые стандарты: EN ISO 7376 : 2003

X-002.99.382

X-007.99.383