

Проктоскоп HEINE Mader

Руководство пользователя.

Примечание:

Перед использованием проктоскопа HEINE внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Проктоскопы HEINE Mader предназначены только для обследования и лечения анального прохода.

Требования безопасности при использовании:

Используйте только источники света, предназначенные для медицинских приборов.

Использование прибора

- Прикрепите прибор к рукоятке.
- Вставьте трубку до упора.
- Поверните трубку, чтобы установить смотровое окошко в желаемое положение. Закрепите трубку с помощью винта (1).

Установка зеркала

Вставьте зеркало (3) в трубку так, чтобы штырек (5) вошел в отверстие (4). Прикрутите зеркало.

Замена лампы

Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.

Открутите лампу за (2). Ввинтите новую лампу.

Очистка и Стерилизация

Не погружайте головку прибора в очистительные растворы.

Избегайте появления царапин на зеркале.

1. Очистка

Очищайте сразу же после использования, чтобы избежать высыхания осадков. Отсоедините трубку от головки прибора и открутите зеркало (3).

– Протрите прибор тканью, смоченной в спирте или детергенте.

– Очистите трубку и зеркало мягкой щеткой и водой или раствором детергента.

2. Дезинфекция

После очистки, как в 1.

– Протрите дезинфицирующим раствором.

– Погрузите трубку и зеркало в дезинфицирующий раствор.

– Высушите перед использованием.

3. Стерилизация

- Проведите газовую стерилизацию с оксидом этилена.
- Трубку и зеркало можно автоклавировать.

Аксессуары и запасные части

Запасная галогенная лампа XHL 2,5 V

X-001.88.040

Запасная галогенная лампа XHL 3,5 V

X-002.88.051