

Ламповая рукоятка HEINE



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49(0)81 52/38-0
Fax +49(0)81 52/38-2 02
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
med 2196 1/12.12



Основные условия гарантии

Вместо определенного законодательством гарантийного срока в 2 года, HEINE предоставляет гарантию на 5 лет с даты поставки товара с завода, на все свое оборудование (за исключением расходных материалов, например, лампочек, одноразовых изделий и аккумуляторов).

Мы гарантируем исправную работу инструмента при условии соблюдения правил, установленных производителем в руководстве по эксплуатации. При обнаружении неисправностей и поломок, возникших в результате фабричного брака в течение гарантийного периода, установленного законодательством и предприятием-изготовителем, изделие подлежит бесплатному ремонту. В случае предъявления претензии в течение гарантийного периода, установленного законодательством, покупатель должен представить доказательство того, что брак присутствовал в момент доставки товара. Гарантия, установленная законодательством и предприятием-изготовителем, не распространяется на повреждения, возникшие в результате закономерного износа, неправильной эксплуатации, использования деталей или запасных частей не торговой марки HEINE (в частности, лампочек, разработанных специально для HEINE по следующим критериям: изменение цвета в зависимости от температуры, долговечность, безопасность, качество оптики и работы). Кроме того, гарантия не распространяется на приборы, ремонт или модификация которых были выполнены лицами, не имеющими лицензии HEINE. Гарантийный ремонт не будет производиться также в случае нарушения клиентом правил эксплуатации. Все последующие претензии, в частности по устранению неисправностей деталей, не связанных напрямую с "HEINE", не рассматриваются. По вопросам ремонта просьба обращаться к поставщику, который вернёт нам изделие или направит их нашему уполномоченному представителю.

Инструкция пользователя

Примечание:

Перед использованием рукоятки HEINE внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Ламповая рукоятка HEINE предназначена исключительно для использования с диагностическими фиброоптическими приборами HEINE.

Общие требования безопасности:

Ремонт может выполняться только квалифицированным персоналом.

Требования безопасности при использовании: не использовать рядом с взрывоопасными объектами.


Установка и использование

- Вставьте вилку (1) ламповой рукоятки в розетку трансформатора 6 V и включите прибор. Если на соединительном кабеле есть переключатель (3), его можно использовать для включения и выключения, оставляя трансформатор включенным постоянно.
- Чтобы отсоединить вилку от трансформатора, вытащите ее, одновременно поворачивая.
- Чтобы прикрепить прибор: возьмите рукоятку одной рукой, а другой вставьте 3 штырька разъема в отверстия на головке прибора. Надавливайте на прибор, пока не раздастся щелчок.
- Чтобы отсоединить прибор: возьмите рукоятку одной рукой и поверните верхнее кольцо (4) против часовой стрелки. Затем другой рукой осторожно вытащите прибор.

Замена лампы

- Вставьте держатель (5) лампы в рукоятку (7). Поверните байонетный коннектор влево и вытащите держатель лампы.

- Открутите лампу (6) от держателя и установите новую лампу такого же типа. Исправная работа прибора гарантируется только при использовании подходящей лампы HEINE.
- Вставьте держатель лампы в рукоятку и поверните вправо, чтобы закрепить байонетный коннектор.

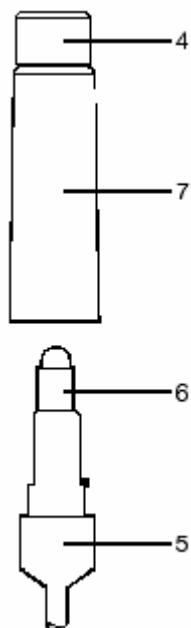

Очистка

Отсоедините прибор от сети перед очисткой. Протрите тканью, смоченной в мыльном растворе.

Технические Спецификации

Галогенная лампа лампочной рукоятки:

Номинальный вольтаж: 6 V

Потребление тока: 0.7 A

Срок службы: около 100 часов

Температура: около 2900 K

Применимый стандарт: EN 60 601-1